

ИНСТРУКЦИЯ

по применению скобчатых аппликаторов КВ («Колочий Врачеватель»)

желудочно-кишечного тракта. Пациента беспокоят вздутие живота, болезненность и напряжение брюшной стенки, снижение аппетита, слабость. Следует применять аппликатор размером 20x20 см. Основные зоны - 16,13,11,1,4,5. Воздействие осуществляют поочередно на симметричные участки указанных зон. Например, на первой процедуре воздействие осуществляют на зону 16 слева (10 мин) и справа (10 мин). Общее время одной процедуры - 20 минут.

8. Избыточная масса тела

Для профилактики избыточной массы тела следует поочередно в ходе курса лечения использовать зоны 6,10,11,16,1. Длительность воздействия на одну зону 20 минут. Целесообразно применять для этих целей аппликатор 20x40 см, но может быть использован аппликатор 20x20 см. В последнем случае следует воздействовать на симметричные участки указанных зон в течение 15 минут с каждой стороны, при этом общее время одной процедуры увеличивается до 30 минут. Лечение избыточной массы тела с помощью аппликаторов КВ будет более эффективным если оно будет сочетаться с диетотерапией.

9. Целлюлит

Лечение проводят с использованием гибких аппликаторов 20x10 см на резиновой (без применения косметических средств) и силиконовой основах, жестких аппликаторов на пластмассовой основе 20x10 см с держателем (КВ-100Д) или аппликаторов, выполненных в виде катка (КВ-30ЛКР) по мобильной методике в области целлюлитных отложений по принципу интенсивного массажа. Проведение массажа может сочетаться с физиотерапевтическим лечением и иглотерапией. Особенно эффективно использование указанных аппликаторов в комплексном лечении с антицеллюлитными лечебными кремами и мазями (только аппликаторы на силиконовой основе!). Продолжительность процедуры - 15-20 минут, курс лечения - 12-15 процедур.

Рекомендации по применению аппликаторов от производителя

Необходимо отметить, что аппликаторы размером 40x20 и 20x20 см могут использоваться не только в лечебных, но и с профилактическими целями. В данном случае их следует располагать вдоль позвоночника с захватом грудного и поясничного отделов. Процедуры проводят ежедневно в течение 7-8 дней, длительность процедуры - 15-20 мин., периодичность курса лечения—1-2 раза в месяц.

При синдроме хронической усталости, сопровождающимся вялостью, слабостью, повышенной раздражительностью и быстрой истощаемостью, депрессией, бессонницей, снижением аппетита рекомендуется использовать аппликатор размером 40x20 см. Длительность воздействия в данном случае 20 мин. В течение первых 10 мин. его следует располагать в шейно-воротниковой зоне, а последующие 10 мин. в пояснично-крестцовой зоне; длительность курса - 10-12-14 процедур.

Аппликаторы на силиконовой основе размером 20x10 см могут использоваться в сочетании с, применением косметических мазей. Аппликатор прикладывают к кожному покрову после нанесения мази и мягко, плавными движениями с нажимом осуществляют своеобразный массаж в зоне воздействия. Данная процедура способствует улучшению микроциркуляции в зоне воздействия, улучшает трофику и эластичность тканей, способствует более лучшему проникновению в ткани косметического средства. Длительность воздействия—5-10 мин.

Следует отметить оригинальную методику применения аппликаторов больных неврологическими проявлениями поясничного остеохондроза. С этой целью можно использовать аппликатор размером 40x20 см в сочетании с приемом ванны. Лучше для этих целей подходят аппликаторы на резиновой или силиконовой основе. После наполнения ванны аппликатор прикладывают к шейному, грудному или пояснично-крестцовому отделу позвоночника и ложатся на него, прижимая его весом своего тела. Длительность процедуры -10-15 мин.

Гарантии изготовителя, сертификаты

При соблюдении правил пользования аппликатором согласно инструкции организация-изготовитель гарантирует его первоначальные качества в течение одного года эксплуатации. Нержавеющая сталь игл, полиэтилен, резина и силикон аппликатора официально разрешены экспертными комиссиями Минздрава РБ и Минздрава Республики Беларусь для применения в лечебной практике. Использование аппликатора согласно выше указанным рекомендациям не вызывает повреждения кожного покрова.

Регистрационное удостоверение Федеральной Службы по Надзору в Сфере Здравоохранения № ФСЗ 2012/13072 от 30.10.2012.

Изготовитель: УП "СИГНУМ", РБ, Минск, пер. Бехтерева, 8
Дистрибуция в России: (495) 514-40-42. Интернет: www.orgon.ru www.mzk.ru

Уважаемый покупатель!

Вы сделали правильный выбор, купив скобчатый аппликатор КВ. Благодарим Вас за покупку и надеемся, что Вы будете полностью удовлетворены нашим изделием.

Аппликатор КВ имеет уникальные лечебные и оздоровительные свойства благодаря запатентованной скобчатой конструкции. Изделие безболезненно и безопасно в применении (повреждения кожного покрова не происходит). Безопасность применения и лечебные свойства подтверждена Регистрационным удостоверением Федеральной Службы по Надзору в Сфере Здравоохранения № ФСЗ 2012/13072 от 30.10.2012.

Скобчатый аппликатор может использоваться как в условиях медицинских учреждений, так и в домашних условиях. Для более эффективного применения скобчатого аппликатора КВ в домашних условиях мы настоятельно рекомендуем внимательно изучить настоящую инструкцию и получить консультацию специалиста, в том месте, где вы приобрели аппликатор. Дополнительную информацию также можно узнать на наших Интернет-сайтах www.orgon.ru или www.mzk.ru

Общие сведения о скобчатых аппликаторах

Аппликаторы КВ состоят из металлических скоб, имплантированных в резиновую, силиконовую или пластмассовую основу. Они предназначены для воздействия на кожные покровы с лечебной или оздоровительной целью.

Как показали клинические испытания, специальная П-образная конструкция металлических игл позволяет значительно усилить лечебный эффект данного аппликатора по сравнению с существующими аналогами.

Аппликаторы, выполненные с использованием резины и силикона, по сравнению с пластмассовыми более гибки, менее жестки, мягче воздействуют на кожный покров. Силиконовая основа также является биосовместимым материалом и как показала практика эффективность их применения выше по сравнению аппликаторами КВ на других основах. В тоже время аппликаторы на жесткой показывают высокую эффективность при лечении заболеваний периферической нервной системы

Различные виды аппликаторов отличаются также по своим функциональным особенностям. Резиновые и силиконовые аппликаторы могут фиксироваться к телу бинтованием, что важно, например, при воздействии на суставы. Кроме того, в некоторых моделях аппликаторов (они маркируются специальным клеймом), используются металлические иглы из стали улучшенной обработки с имплантацией ионов серебра, что повышает эффективность лечения, оказывает антисептический эффект при контакте игл с кожей.

Порядок работы со скобчатыми аппликаторами КВ

Перед применением изделия необходимо подвергнуть дезинфекции путем замачивания аппликатора путем полного погружения в 3% раствор перекиси водорода с добавлением 0,5% моющего средства типа "Лотос", "Прогресс", "Астра". Температура дезинфицирующего раствора - не менее 18°С, время выдержки — 25-35 мин. После извлечения из дезинфицирующего раствора изделие необходимо промыть в проточной воде до полного удаления запаха дезинфицирующего раствора.

Процедура должна проводиться лежа, при температуре комфортной для пациента.

1. Выберите рефлекторную зону для воздействия с учетом вида заболевания.
2. В положении сидя приложите аппликатор к выбранной рефлекторной зоне и, прижимая аппликатор к телу, примите лежачее положение. При этом аппликатор располагается под рефлекторной зоной, и воздействие осуществляется за счет давления веса тела на аппликатор.
3. Положение пациента во время процедуры должно; быть максимально удобным и комфортным.
4. Продолжительность процедуры в зависимости от вида заболевания колеблется от 10 до 35 минут.
5. После окончания процедуры при индивидуальном применении аппликатор достаточно промыть водой и просушить. При использовании аппликатора в условиях медицинских и профилактических учреждений обработка аппликатора производится согласно указанному выше методу каждый раз перед применением.

Основные показания к применению

- Заболевание периферической нервной системы; неврологические проявления остеохондроза позвоночника любой локализации, моно- и полиневриты верхних и нижних конечностей, плекситы; травмы периферических нервов; шейно-плечевой синдром.
- Бронхит, бронхиальная астма.

- Неврозы, импотенция, фригидность,
 - Дискинезия пищевода, гастрит, дуоденит, функциональные расстройства желудка и кишечника.
 - Нейроциркулярная дистония.
 - Травмы и дегенеративно-дистрофические заболевания суставов в период выздоровления.
- Противопоказания.** Не следует применять аппликатор при: инфаркте миокарда (зоны 6, 7, 8, 9, 10, 11); легочной и сердечной недостаточности I и II степеней (зоны 6, 7, 8, 9, 10, 11); беременности; злокачественных новообразованиях; эпилепсии; заболеваниях кожи (при наличии кожного поражения в зоне предполагаемого воздействия); острых воспалительных процессах и инфекционных заболеваниях; язве желудка (в проекции над ней как спереди, так и сзади); варикозное расширение вен (зоны 3, 5).

Методики лечения заболеваний

Выбор рефлекторных зон кожных покровов для воздействия производится с учетом симптоматики и локализации заболевания и правил, применяемых в рефлекторной терапии.

Аппликатор чаще применяется локально, то есть непосредственно на место патологического процесса, например, болевого синдрома или на зоны кожных покровов, располагающихся непосредственно над внутренними органами, суставами, мышцами.

С учетом рекомендаций врача воздействие может осуществляться и на отдельные рефлекторные зоны Захарьина-Геда, зоны сегментарной иннервации т.д.

Повторные курсы лечения могут проводиться через 14-16 дней после первого курса лечения.

1. Вертеброгенный пояснично-крестцовый радикулит

Чаще основной жалобой больных являются боли в пояснично-крестцовой области. В этом случае для лечения можно использовать цельный аппликатор размером 20x40 см. Для лечения аппликатор располагают в зоне 1 продольно. Лечение проводят ежедневно, продолжительность процедуры - 20-25 минут.

При наличии болей в ноге (чаще по задней, реже по передней поверхности ноги) используют два аппликатора 20x20 см. Основные зоны для воздействия в течение первых 4-6 процедур расположены на передних и задних поверхностях бедер и голени - зоны 2,3,4,5, где располагают два аппликатора размером 20x20 см. В последующем при уменьшении болей в ноге следует чередовать через день воздействие на зоны 2,3,4,5 с воздействием на зону 1. В зоне 1 аппликаторы 20x20 см располагают симметрично с двух сторон вдоль позвоночника. Если боль в спине беспокоит с одной стороны, аппликаторы располагают в зоне 1 друг над другом вдоль позвоночника с большой стороны. Лечение также проводят ежедневно, длительность процедуры 25 минут. При устойчивом к лечению болевом синдроме допускается воздействие по описанной методике одновременно на ногу и на поясничную область. В этом случае общее суммарное время процедуры составляет 30-35 минут. Курс лечения - 10-12 процедур.

2. Неврологические проявления остеохондроза шейного отдела позвоночника

При болях в шейном отделе позвоночника аппликатор 20x10 см располагают в зоне 6 поперечно, длительность процедуры 20-25 минут. Курс лечения 10-12 процедур.

Если боли локализуются в шейно-воротниковой области преимущественно с одной стороны и распространяются в руку, необходимо использовать одновременно два аппликатора. Один 20x20 см располагают в зоне 6 с большой стороны, а другой 20x10 см подкладывают под плечо или предплечье с большой стороны. Длительность процедуры - 20-25 минут, курс лечения - 10-12 процедур. Данную методику можно использовать для лечения плече-лопаточного периартрита, плексита. При болях в области шеи и затылка также рекомендуется воздействовать на зону 15 в течение 10 минут. Курс - 8-10 процедур.

3. Нейроциркуляторная дистония (вегетососудистая дистония)

Больных чаще всего беспокоят головные боли в области затылка, нарушения сна, повышение артериального давления, снижение работоспособности и т.д. С помощью аппликатора размером 20x20 см поочередно воздействуют на симметричные участки зон 6, 7, 15, 3 по 12-15 мин с каждой стороны, т.е. общее время процедуры составляет 24-30 мин. Курс лечения - 10-12 процедур.

С профилактической целью при наличии данного заболевания лучше использовать аппликатор 40x20 см. На первой процедуре аппликатор располагают поперечно в симметричных участках зоны 6. На второй процедуре - продольно по центру позвоночника от зоны 15 до зоны 7. На третьей процедуре аппликатор подкладывают под симметричные икроножные области зоны 3. В дальнейшем последовательность воздействия повторяется. Длительность одной процедуры - 20 минут, курс профилактического лечения составляет 8-10 процедур. Повторный курс - через 2-3 недели.

4. Неврастения

Пациенты обычно предъявляют жалобы на повышенную раздражительность, плаксивость,

вспыльчивость, бессонницу, снижение аппетита и настроения. Перечисленные выше общие симптомы могут сопровождаться специфическими жалобами, которые следует обязательно учитывать для повышения эффективности лечения. Если указанные выше симптомы сочетаются с вегетативными нарушениями со стороны сердечно-сосудистой системы в виде головокружения, головных болей лобно-височной локализации следует чаще использовать зоны 15, 6. При чувстве "заморания" и функциональных болях в области сердца (при нормальных показателях электрокардиограммы и отсутствии органических сердечно-сосудистых заболеваний) необходимо воздействовать на зоны 7, 10 по принципу чередования через день. При подавленном настроении, апатии, пониженном артериальном давлении, первых признаках сексуальных нарушений воздействие необходимо осуществлять в зонах 1, 13.

Если общие симптомы дополняются нарушениями со стороны желудочно-кишечного тракта в виде отрыжки, изжоги, умеренной нечеткой болезненности выше и ниже пупка, расстройствами дефекации аппликатор следует располагать в зонах 11, 16, 5, 4. При всех перечисленных выше расстройствах следует применять аппликатор размером 20x20 см. Указанные зоны необходимо использовать по принципу чередования. Время воздействия на одну зону 15 мин. Курс лечения - 8-10 процедур.

5. Импотенция и простатит

Для лечения импотенции воздействие осуществляется двумя аппликаторами размером 20x20 см на симметричные зоны 14, 12, 13, 1 в указанной последовательности. При воздействии на зоны 13, 12 пациент лежит на животе, а на зоны 14, 1 - на спине. Продолжительность одной процедуры - 10-15 минут. Курс лечения состоит из 10-12 процедур. Во время прохождения курса лечения половой контакт временно не рекомендуется.

При лечении простатита аппликаторы размером 20x20 см располагают в зонах 1, 13, 2, 12. Воздействие осуществляют в указанной очередности и симметрично. Длительность одной процедуры 20 минут. Например, на первой процедуре аппликатор располагают в зоне 1 слева - длительность воздействия 10 минут и справа - длительность воздействия тоже 10 минут. На следующей процедуре используют зону 13 и т.д. На курс лечения рекомендуется 14-15 процедур. Повторный курс - через 2-3 недели.

Указанный метод лечения можно использовать для профилактики импотенции и простатита. Для этих целей лучше подходит аппликатор размером 40x20 см. Воздействие осуществляют в зонах 1, 14, 2, 3, 13, 4, 12. Аппликатор располагают поперечно, одновременно захватывая симметричные участки одной зоны. Длительность воздействия на одну зону и на одну процедуру 15 мин.


6. Бронхиальная астма

Больные бронхиальной астмой страдают от приступов удушья, затруднения дыхания. В течение первых 5-6 процедур следует выбрать зоны 6, 7, 8, 9, 10, 11 при этом аппликатор размером 40x20 см располагают поперечно по отношению к позвоночнику, воздействуя одновременно на зоны слева и справа. В дальнейшем по мере улучшения состояния, начиная с 7-й процедуры, наряду с указанными выше зонами следует использовать через день зону 1. Длительность процедуры - 30 минут, курс лечения - 12-14 процедур.

Пожилым и ослабленным больным лучше использовать аппликатор размером 20x20 см в вышеуказанных зонах. Во время одной процедуры действуют на одну зону и аппликатор располагают последовательно симметрично слева (10 мин) и справа (10 мин). Длительность одной процедуры 20 мин, курс лечения - 8-10 процедур.

7. Синдром раздражения толстой кишки

Это функциональное нарушение деятельности кишечника. Характеризуется частыми спастическими или атоническими запорами или периодической сменой запора поносом. При этом у пациента отсутствуют инфекционные заболевания и органические нарушения со стороны органов

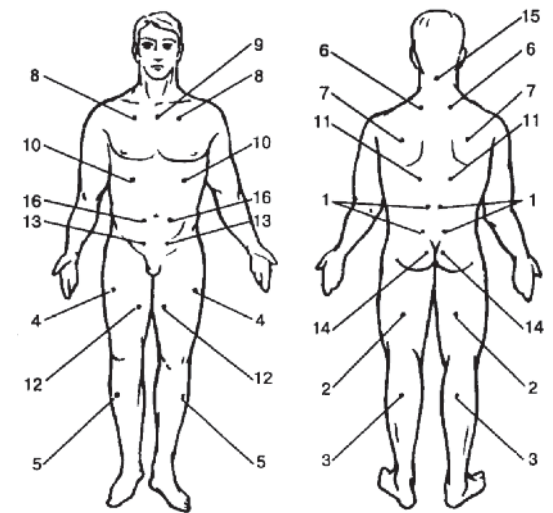

Расположение зон воздействия аппликаторами КВ на теле человека